

perfectpur medforte



Was ist perfectpur medforte ?

perfectpur medforte ist ein Flächen- und Raumdesinfektionsmittel **ohne Alkohol**. Es handelt sich um eine gebrauchsfertige Lösung mit bakterizider, levurozider und viruzider Wirkung. (d.h. wirksam gegen unbehüllte und behüllte Viren wie z.B. Corona-Viren)

Anwendungsbereiche

im gewerblichen Bereich

- **Pflegeheimen**; Toilettenstühlen, alle Oberflächen, Griffen und Stellen mit Handkontakt, ...
- **in Krankentransportern**
- **Studios und Praxen**; Räume bei Kunden- / Patientenwechsel, Wartezimmer und sowie alle Arten von Fußböden,...
- Desinfektion von : Studios und Praxen; Klimaanlage, Mixern und Gastronomischen Behältern,...
- **zur Trinkwasseraufbereitung**; jeglicher Art

im privaten Bereich

- Überall wo eine akute / erhöhte Keim-, Virus- und Pilzbelastung auftritt
- **Desinfektion von Arbeitsflächen und Geräten**; wie Entsafter, Luftbefeuchter oder Staubsauger,...
- **Geruchsminderung**
- **zur Trinkwasseraufbereitung**; im Urlaub ob im Hotel oder im Wohnmobil,...
- **in der häuslichen Pflege**; Flächendesinfektion (Produktgruppe 54 „Zum Verbrauch bestimmte Pflegehilfsmittel)

Anwendung:

Sprühverfahren:

perfectpur medforte zur Desinfektion vor oder nach dem Gebrauch auf Gegenstände und Oberflächen je nach Bedarf aufsprühen und trocknen lassen. **NICHT VERWISCHEN!**

Zertifizierung:

perfectpur medforte ist in der Desinfektionsmittelliste beim IHO* geführt.
(*Industrieverband Hygiene & Oberflächenschutz)



Verfügbare Gebindegrößen:

250 ml, 1 Liter, 5 Liter, 10 Liter - Größere Gebinde auf Anfrage

Verträglichkeit:

perfectpur medforte enthält keinen Alkohol und keine:

- Farbstoffe
- Konservierungsstoffe
- Duftstoffe
- Lösungsmittel oder Ähnliches

Unverträglichkeiten:

keine bekannt.

Vorsichtsmaßnahmen:

Siehe Sicherheitsdatenblatt (erhältlich unter www.perfectpur.de)

Materialverträglichkeit prüfen.

Bei unsachgemäßer Anwendung übernehmen wir keine Haftung!

Lagerung:

perfectpur medforte Produkte bei Zimmertemperatur und dunkel lagern.

Vor direkter Sonneneinstrahlung und UV-Licht schützen. Für Kinder unzugänglich aufbewahren.

Restentleerte Verpackung der Wertstoffsammlung zuführen.

Haltbarkeit:

Das Haltbarkeitsdatum finden Sie auf dem Behälter.

Unbedingt Lagerhinweise beachten.

Nach dem Öffnen innerhalb von 90 Tagen aufbrauchen.

Wirkstoff:

Aktives Chlor freigesetzt aus Hypochloriger Säure: $\leq 1,0\text{g}/1000\text{ml}$

BAuA-Nr.: N-106492, Produktart 2,3,4,5

Weitere Produkte:

perfectpur skin^{plus} & skin GEL^{plus}, **perfectpur Händedesinfektion**, **perfectpur homefresh**, **perfectpur horse**, **perfectpur animal**, **perfectpur flora**, **perfectpur Mundhygiene**

Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Berater oder an: info@perfectpur.de

